


## Montage

### 4.1 Montage der Ladung

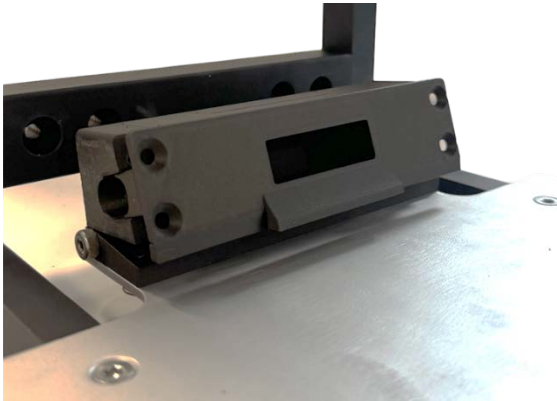

Entfernen Sie den Deckel der Ladehalterung.




Setzen Sie den Ladestecker in die dafür vorgesehene Öffnung ein, bis er vollständig in der Halterung sitzt.

Das Kabel kann dabei wahlweise Links oder Rechts ausgeführt werden.



Setzen Sie den Deckel auf die Ladeinheit.

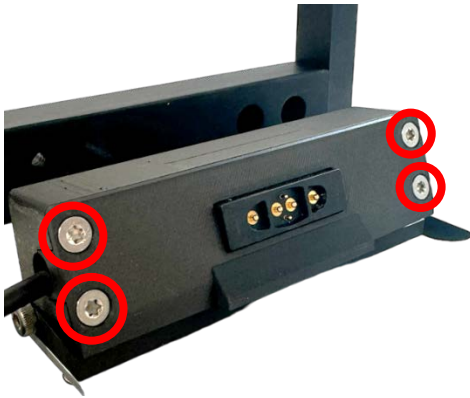


Bringen Sie die vier mitgelieferten Schrauben\* (4x SK M4 x 8) an die Ladehalterung an.


**Achten Sie auf den Anzugsmoment 1,0Nm.**

\* Schraubensicherungslack **mittelfest** verwenden

## 4.2 Montage des Power Supply für D60/DX

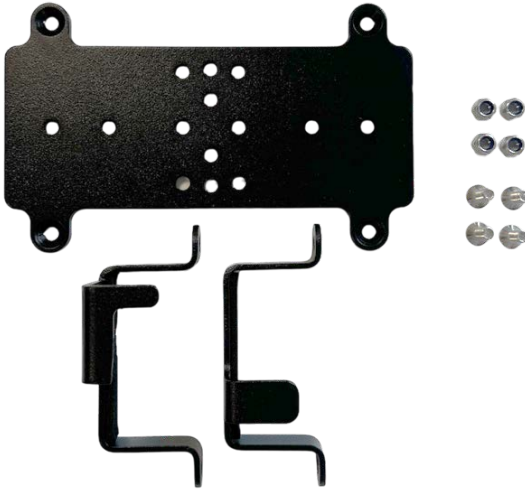

- 1 X Halterung Netzteil mindray D60/DX
- 1 x Netzteil mindray
- 1 x Schraubendreher TX 25
- 4 x SK M5 x 14

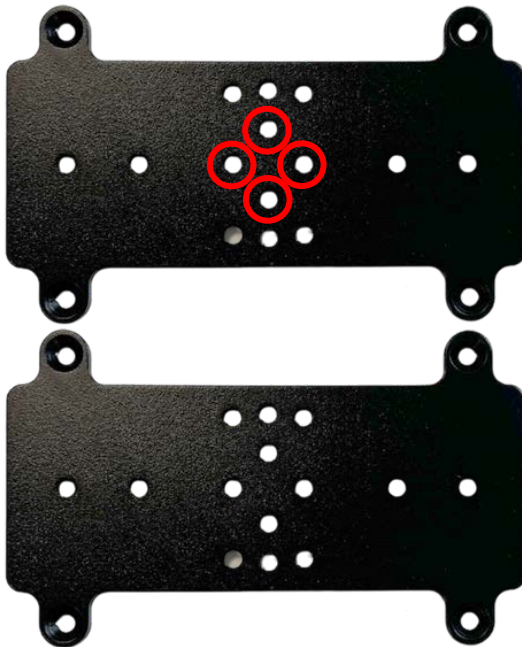

Für die Montage einer **Klaue** nutzen Sie die markierten Löcher.


Für die direkte Montage an der **Wand** nutzen Sie eine der verfügbaren Löcher.



Setzen Sie die  
Netzteilklemmen auf das  
Netzteil



Stecken Sie den Netzstecker  
in das Ladegerät und setzen  
Sie die zweite  
Netzteilklemme auf.

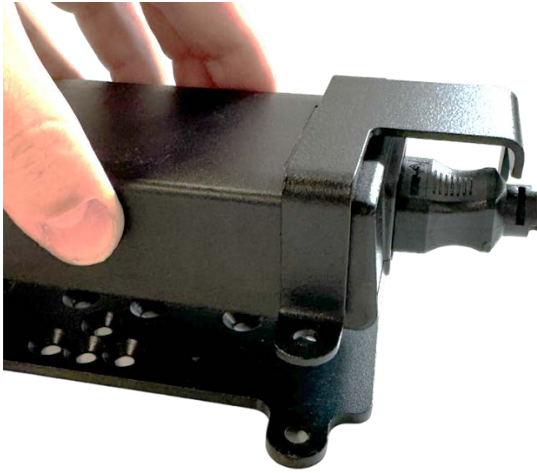

Setzen Sie das Netzteil mit den Klemmen auf die Grundplatte.



Bringen Sie die vier mitgelieferten Schrauben (4x SK M5 x 14) mit den selbstsichernden Muttern an die Ladehalterung an.

## Bedienung des Halterungssystems

### 5.1 Vor der Erstinbetriebnahme beachten

#### WARNUNG




Die Halterung darf nur in Übereinstimmung mit den Begleitpapieren verwendet werden. Nur unter diesen Voraussetzungen betrachtet sich der Hersteller für die Auswirkung auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Systems als verantwortlich.

Verwendung der Halterung ist nur mit folgender Tasche möglich:



## 5.2 Montage der Halterung an der Wand

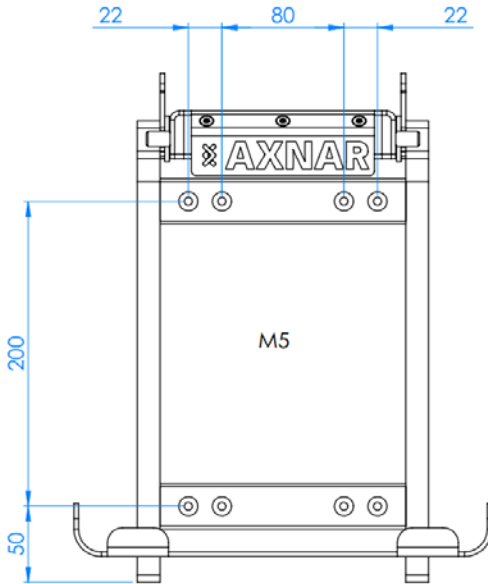

Für die Montage an der Wand, nutzen Sie das angezeigte Bohrbild.


**HINWEIS** Befestigen Sie die Halterung immer genau senkrecht auf einem ausreichend stabilen Untergrund.



**HINWEIS** Der Untergrund muss so stabilisiert werden, dass jedes Gewinde mind. 300 Kg Belastung standhält.



### 5.3 Einsetzen und Entnehmen des D60/DX

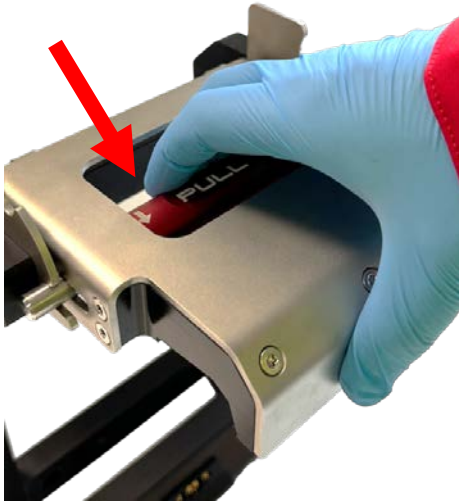


Öffnen Sie die den Verschluss durch Ziehen des roten Hebels.



Setzen Sie den D60 / DX auf die Grundplatte.



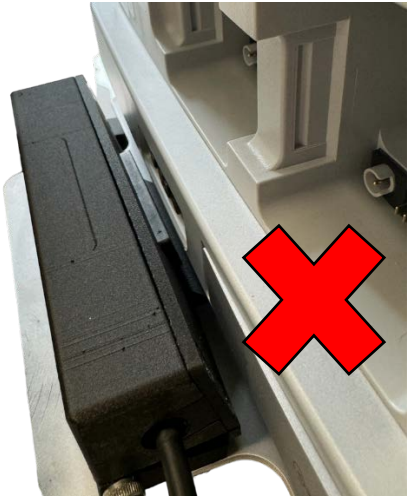


Das Gerät gleitet auf der Rückseite an der Ladehalterung entlang und verbindet sich automatisch.



Achten Sie auf den korrekten Sitz der Ladung.



Schließen Sie den Bügel, bis er in der unteren Position einrastet.

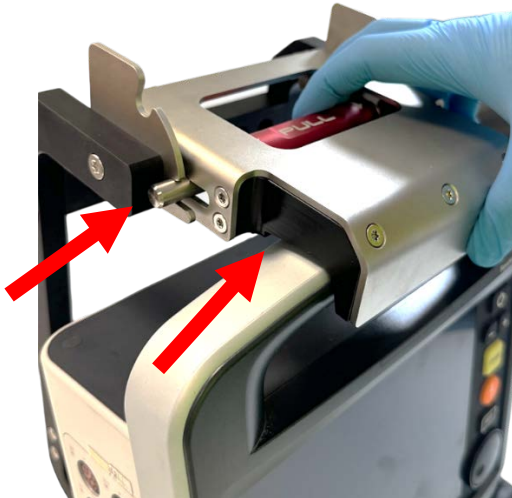

Die Halterung ist nun verschlossen und gesichert.

**Prüfen Sie, dass der Hebel richtig eingerastet ist.**



Für die Entnahmen öffnen Sie den Bügel und entnehmen Sie das Gerät aus der Halterung.